

Options

ご希望に応じてお選びいただけます



センサー式
ソープディスペンサー
ER-AS11

センサー式
アルコールディスペンサー
ER-AS1

センサー式
泡ソープディスペンサー
ER-AS51

ペーパータオルホルダー
クリアカッター
ER-ACC ▲



ステンレス製
滅菌クリアタオルホルダー
ER-CTS ■

Towel



滅菌タオル CLEAR
ER-CT01 1ケース：20箱(60枚入/箱)
■滅菌クリアタオルホルダー用タオル

クリアロール
ER-CS01
▲クリアカッター用タオル

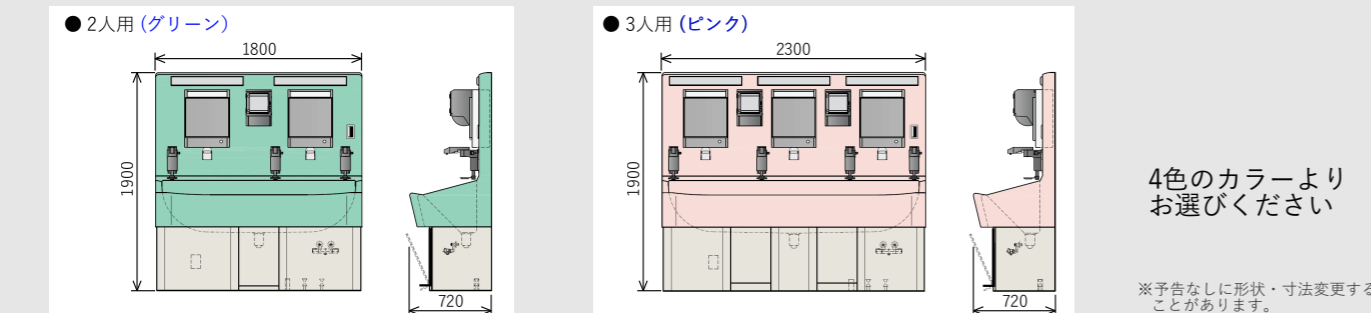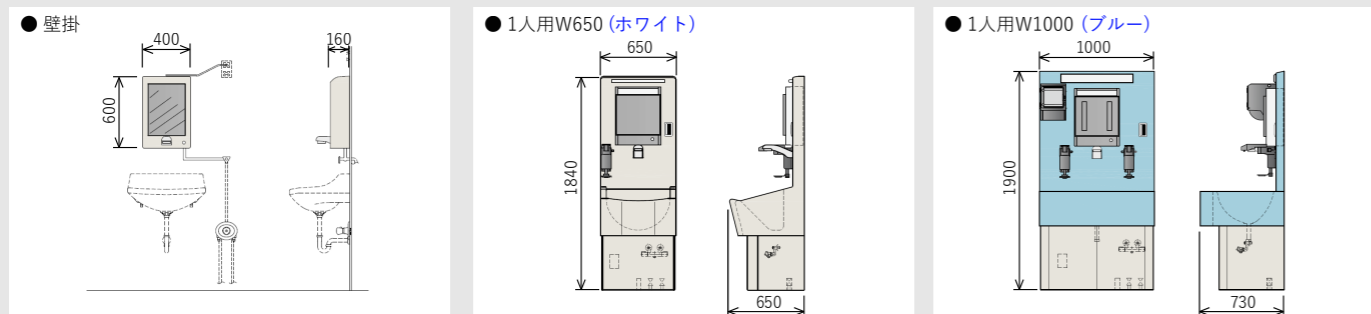

4色のカラーより
お選びください

※予告なしに形状・寸法変更することがあります。


型 式	壁 掛	1人用 W650	1人用 W1000	2人用	3人用
Type1 水道水直結	ER-SF	ER-F1-SF-650	ER-F1-SF-1000	ER-F2-SF	ER-F3-SF
Type2 プレフィルター	ER-SFP	ER-F1-SFP-650	ER-F1-SFP-1000	ER-F2-SFP	ER-F3-SFP
Type3 スパイラルシャワー	ER-SFB	ER-F1-SFB-650	ER-F1-SFB-1000	ER-F2-SFB	ER-F3-SFB
Type4 無菌フィルター	ER-SFM	ER-F1-SFM-650	ER-F1-SFM-1000	ER-F2-SFM	ER-F3-SFM

Fine Force

ファインフォース

滅菌手洗いから清潔な手洗いへ

手軽に使えて清潔な手洗いができる
医療向け手洗ユニットです

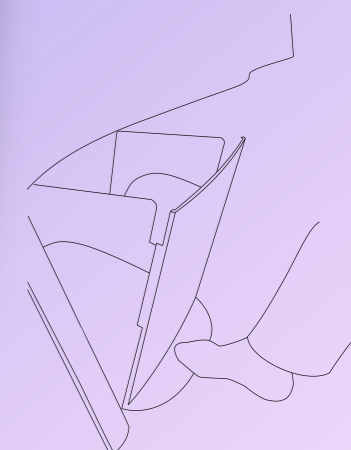

ダストボックス標準装備



下パネル部分にダストボックスを装備
しています。使用済みタオルをすぐに
捨てるができます。

ER 株式会社 エミリエ

医療設備機器開発/医療システム
～刃物ふるさと堺～ 医療刃物/堺刃物

本 社 〒590-0937 大阪府堺市堺区宿屋町西2丁2-22-210
☎ 072-204-1100 Fax 072-204-1900
開発センター 〒590-0906 大阪府堺市堺区三宝町3丁178-1
☎ 072-220-2511 Fax 072-320-3676
東京オフィス 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館
B3-329-1

エミリエ堺刃物館 〒590-0937 大阪府堺市堺区宿屋町西2丁2-22
【刃物事業部 本店】 ☎ 072-204-1100 Fax 072-204-1900
エミリエ堺刃物館 〒590-0906 大阪府堺市堺区三宝町3丁178-1
【刃物事業部 三宝店】 ☎ 072-220-2511 Fax 072-320-3676

ER 株式会社 エミリエ

特許技術活用製品

スパイラルシャワー

鏡内部に搭載(Type3)

- 電力なしで使用可能
スパイラルシャワーの気液混合システムは電力不要で動作します。蛇口から出る水の力を利用し専用薬液とマイクロナノバブルを混合させた水を作り出します。
- 専用薬液グリセロールで保湿
保湿効果のあるグリセロールと、消毒効果のあるベンザルコニウムクロリドを配合した専用の薬液グリセロールをご使用ください。手洗いをしながら保湿効果が期待できます。
- 節水効果
スパイラルシャワーシステムは通常と比べ約45%の節水効果があります。
※FineForce Type1水道水直結と比較した場合



豊富なラインナップで 医療現場の水を清潔に保ちます

特許技術活用製品

クロルパック

Features 全ての蛇口に搭載

- 逆汚染防止
水道水は放置すると塩素濃度が低下してしまいます。蛇口にクロルパック(塩素ビーズ)を設置すると蛇口内に溜まった水と反応して次亜塩素酸を生成し、塩素濃度を上昇・維持することができます。塩素濃度低下による微生物・細菌の繁殖を抑え、蛇口内溜水からの逆汚染を防止します。
※約4時間で溜水塩素濃度を3~5ppm程度上昇
- 高い消毒効果
蛇口内に作り出された弱酸性次亜塩素酸水は弱酸性から微酸性程度になり、消毒効果が最も高くなります。
- 長時間効果持続
セット後、1年間効果が持続します。



鏡内部に搭載の水処理モデルは4タイプからお選びいただけます



● 1人用
(左 W650/右 W1000)



● 壁掛



● 2人用



● 3人用



● ステンレス
設置箇所の幅に合わせて製作が可能です。

Type1 水道水直結

水道水をそのまま蛇口から出水するシンプルなモデルです。

Type2 プレフィルター内蔵

ポリプロピレン製ウインドフィルター(ろ過精度1μm)のカートリッジ内にクロルパックを搭載しています。

※1年に1度カートリッジ交換が必要です。

Type3 スパイラルシャワー内蔵

マイクロナノバブル発生装置で空気を取り入れ、超微細気泡を作り出します。この泡が毛穴に入り込んだ老廃物や微細な汚れを取り除き、洗浄力の向上が見込めます。さらに特許技術を用いて薬液を同時に混合し、手荒れの発生を予防します。

※特許技術活用製品

Type4 無菌フィルター内蔵

ポリエチレン中空糸膜 超精密ろ過フィルター(ろ過精度0.1μm)を搭載しています。

※1年に1度カートリッジ交換が必要です。